

CİHAZBİLGİLERİ					
MARKASI		BULUNDUĞU YER		BAKIMPERİYODU	GÜNLÜK
MODELİ		SERİ NO			
YAPILACAKLAR					
1	Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak.				
2	Ped kablosu (2 adet) ve pedleri kontrol edilecek.				
3	Ekg kablosu kontrol edilecek				
4	Cihazın fiziki durumu ve mekanik bağlantıları kontrol edilecek.				
5	Yedek ekg kağıdı olup olmadığı kontrol edilecek.				
6	Defibrilatör de ekg kağıdı olup olmadığı kontrol edilecek .				
7	Steril defibrilatör kaşıklarının odada olup olmadığı kontrol edilecek.				
8	Ekran da hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek.				
9	Cihazın şarj durumu kontrol edilecek. Yazıcı testleri ve çalışabilir testleri yapılacak.				
10	Kontrollerde print edilmiş ekg kağıdı günlük dosyalanacak.				
11	Yapılan kontroller de görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek.				
KONTROLLER					
TARİH	CİHAZIN DURUMU	KONTROL EDEN ADI-SOYADI	İMZA		
01/...../.....					
02/...../.....					
03/...../.....					
04/...../.....					
05/...../.....					
06/...../.....					
07/...../.....					
08/...../.....					
09/...../.....					
10/...../.....					
11/...../.....					
12/...../.....					
13/...../.....					
14/...../.....					
15/...../.....					
16/...../.....					
17/...../.....					
18/...../.....					
19/...../.....					
20/...../.....					
21/...../.....					
22/...../.....					
23/...../.....					
24/...../.....					
25/...../.....					
26/...../.....					
27/...../.....					
28/...../.....					
29/...../.....					
30/...../.....					
31/...../.....					