



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

ANESTEZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Döküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ANE_T_01	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı / Sorumlu Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



ANESTEZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Döküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ANE_T_01	02.01.2023	-	-	3

1. AMAÇ

Anestezi cihazının doğru ve güvenli kullanımını sağlamak ve hastada oluşabilecek cihazla ilgili komplikasyonlarını önlemektir.

2. KAPSAM

Hastanede bulunan anestezi cihazlarını kapsar.

3. KISALTMALAR:-

4. TANIMLAR:-

5. SORUMLULAR

Anestezi uzmanı ve teknisyenleri.

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1.Cihazın Oksijen alışıını sağlayan beyaz hortumlu jakı merkezi sistemin Oksijen jakına takın.
- 6.2.Cihazın Azot alışıını sağlayan mavi hortumlu jakı merkezi sistemin Azot jakına takın.
- 6.3.Cihazın Hava alışıını sağlayan siyah hortumlu jakı merkezi sistemin Hava jakına takın.
- 6.4.Cihazın siyah hortumlu AGS jakını merkezi sistemin AGS jakına takın.
- 6.5.Cihazın fişini UPS prizine takın.
- 6.6.Cihazdan hastaya gaz giriş çıkışıını sağlayan hasta devresini uygun bir şekilde yerleştirin.(yönü cihaza doğru olan hortum girişi ekspiryum için, cihazdan dışarı ok işareti olan hortum girişi inspiryumu sağlar,üzerinde balon işareti olan hortum girişi manuel ventilasyonu sağlar)
- 6.7.Hasta devresinin cihaz ile bağlantı noktalarına cihaz içerisine nem ve sıvı girişini önlemek amacı ile ısı ve nem koruyucu filtre takılmalıdır.
- 6.8.Cihazı, üzerindeki açma düğmesi ile açın.
- 6.9.Flowmetrelere O2 (Oksijen), hava ve N2O (Azot) gazlarının gelip gelmediğini kontrol edin.
- 6.10. Cihazın self test ve gaz kaçağı kalibrasyonunu yapın.
- 6.11. Balonu gaz kaçağı yönünden kontrol edin.
- 6.12. Cihaz kanisterinin soda – Lime ile dolu olmasına ve temiz olmasına dikkat edin.
- 6.13. Vaporizatörlerin dolu olmasına dikkat edin.
- 6.14. Hastaya hava akışıını sağlayan hasta devresini bağlayın, doktorunuzun istediği ventilasyon modunu ayarlayarak onaylayın.



ANESTEZİ CİHAZI KULLANMA TALİMATI

Döküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ANE_T_01	02.01.2023	-	-	3

- 6.15.** Vaka sonrası cihaz stand-by konumuna alınarak kullanılan devreler ve filtreler değiştirilip gereken temizlik yapılarak bir sonraki vakaya hazır bir durumda bırakılır.
- 6.16.** Cihaz kullanılmadığı zamanlarda stand-by konumunda bırakılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-