



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

**PCA (PATIENT CONTROLLED ANALGESIA- HASTA KONTROLLÜ
ANALJEZİ) CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ANE_T_03	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı / Sorumlu Hekimi	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



**PCA (PATIENT CONTROLLED ANALGESIA- HASTA KONTROLLÜ
ANALJEZİ) CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ANE_T_03	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Hastanelerinde PCA kullanım basamaklarının anlatılması

2. KAPSAM

Talimat PCA (patient controlled analgesia- hasta kontrollü analjezi) cihazı kullanma sürecine ilişkin faaliyetleri kapsar.

3. KISALTMALAR: -

4. TANIMLAR: -

5. SORUMLULAR

Anestezi Hekimi, Anestezi Teknikerleri ve Hemşirelerinin sorumluluğundadır.

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Cihazın üzerinde hangi yoldan (IV veya epidural) bağlanacağı yazılı olmalıdır.
- 6.2. İnfüzyon sıvısının içinde bulunan ilaç adı ve konsantrasyonu yazılı olmalıdır.
- 6.3. Cihazın bataryası fişe takılır elektrik geldiğinden emin olunur.
- 6.4. Hastaya bağlanacak line steril olacak şekilde bağlanır.
- 6.5. Üçlü musluk ve klipslerin yönü ve açıklığı kontrol edilir.
- 6.6. Cihaz on/off düğmesine basılarak açılır.
- 6.7. Anestezi uzmanı ya da teknikeri tarafından cihaz programlanır (bazal infüzyon, bolus doz, kilitli kalma süresi, güvenlik ayarları).
- 6.8. Ekrana press run/stop to infuse yazısı gelince run stop düğmesine basılır.
- 6.9. Cihaz çalışmaya başlar.
- 6.10. Cihazın alarm vermesi durumunda anestezi ekibine haber verilir.
- 6.11. PCA takılan hastaların takibi “PCA Takip Formu” ile yapılır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1. PCA Takip Formu