



YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ

VÜCUT ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
BES_T_01	02.01.2023	-	-	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Başdiyetisyen	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



VÜCUT ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
BES_T_01	02.01.2023	-	-	3

1.AMAÇ

Cihazın uygun çalışmasını sağlamak.

2.KAPSAM

Cihazın kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3.KISALTMALAR:-

4.TANIMLAR:-

5.SORUMLULAR:

Poliklinik disyetisyenleri

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.Kullanım Amacı

6.1.1.Bu cihaz (TANITA MC-780MA) vücut ağırlığı ve bileşimine ilişkin durum taramasında kullanılır.

6.1.2.Cihaz, yağlı ve yağsız doku oranı ile ilgili bireylerin vücut kompozisyonundaki değişikliklerin izlenmesinde kullanılır.

6.1.3.Cihaz, sağlık ve fiziksel uygunluk için, bireylerin beslenme ve egzersiz programlarının etkinliğini değerlendirmek için kullanılır.

6.2.Kullanım Aralığı

6.2.1.Kilo kapasitesi 270 kilograma kadardır.

6.2.2.Boy girişi 90-249 santimetre aralığındadır.

6.2.3.Yaş girişi 5-99 yaş aralığındadır.

6.3.Kullanım Şekli

6.3.1.Kişisel bilgilerin hepsi girildikten sonra ölçüm başlar.

6.4.Kullanıcı Uyarıları

6.4.1.Bu cihaz kalp pili veya diğer mekanik implantlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

6.4.2.Elektrik fişini ıslak el ile tutmayınız.Bu durum, elektrik çarpması, yangın ve elektrik kaçağına

6.4.3.neden olabilir. Cihazınızı yanıcı gaz ve oksijen kaynaklarından uzak tutunuz.

6.4.4.Cihazın herhangi bir bölümünde değişiklik yapmayınız. Bu elektrik çarpmasına, yaralanmaya ya da analiz doğruluğuna etki eder.

6.4.5.Sudan uzak tutunuz.

6.4.6.Metal alerjisi olan kişilerde kullanmaktan kaçınınız.

6.4.7.Cihazda kullanılan paslanmaz çelik olan elektrotlar, alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

6.4.8.Cihazın üzerine atlamayınız.

6.4.9.Cihazın üzerinde zıplamayınız.

6.4.10.Bu cihazı elektromanyetik dalgalar yayan diğer ürünlerin yakınında kullanmayınız.

6.4.11.Boşluklara ya da deliklere parmağınızı sokmayınız.

6.4.12.Cihaza yaslanmayınız.

6.4.13.Cihazı taşıırken elektrik kablolarını çıkartınız.



VÜCUT ANALİZ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
BES_T_01	02.01.2023	-	-	3

6.4.14.Cihazı taşıırken ayarlanabilir ayakları sıkınız / kapatınız.

6.5.Kullanıcı Temizlik Ve Bakımı

6.5.1.Her kullanım öncesinde deterjan dezenfektan köpük ve tek kullanımlık havlu yardımıyla ellerin ve ayakların temas ettiği yüzeyler silinir.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:-