



AMELİYAT LAMBASI KULLANIMI

- ❖ Vaka öncesi steril lamba sapı takılıp sağa doğru çevirme yaparak sabitlenir.
- ❖ Lamba ışık düğmesi açılır ve istenilen parlaklıkta ayarlanır.
- ❖ Lamba çemberi hastanın ameliyat bölgesini gösterecek şekilde ayarlanır.
- ❖ Odak ayarları lamba sapı ile sağa sola çevirim yaparak ayarlanır.
- ❖ Ameliyat bittikten sonra steril lamba sapı sökülerek gereken temizlik yapılır, lamba tekrar yukarıya kaldırılır ve lamba düğmeleri kapatılır.