



AMELİYAT MASASI KULLANIMI

- ❖ Masanın güç kablosu prize takılır ve açılır.
- ❖ Güvenli kullanım için masanın toprak kablosunun takılı olup olmadığı kontrol edilir.
- ❖ Vaka öncesi masanın kontrol kumandası üzerinden tüm fonksiyonların çalışırılığı kontrol edilir.
- ❖ Vaka esnasında kullanılacak aparatlar (kol,bacak tahtası vs) takılır.
- ❖ Hasta alınırken masa düz pozisyonda bulundurulmalıdır.
- ❖ Vaka esnasında masaya verilecek tüm pozisyonlar kumanda üzerinden ayarlanabilir.
- ❖ Vaka sonrası gerekli temizlik yapılarak masa temiz bırakılmalıdır.