



ANESTEZİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın Oksijen alışıını sağlayan jakı merkezi sistemin Oksijen jakına takın.
- ❖ Cihazın Azot alışıını sağlayan jakı merkezi sistemin Azot jakına takın.
- ❖ Cihazın fişini prize takın.
- ❖ Cihazdan hastaya gaz giriş çıkışıını sağlayan hasta devresini uygun bir şekilde yerleştirin.(yönü cihaza doğru olan hortum girişi ekspiryum için, cihazdan dışarı ok işareti olan hortum girişi inspiyumu sağlar,üzerinde balon işareti olan hortum girişi manuel ventilasyonu sağlar)
- ❖ Hasta devresinin cihaz ile bağlantı noktalarına cihaz içerisine nem ve sıvı girişini önlemek amacı ile ısı ve nem koruyucu filtre takılmalıdır.
- ❖ Cihazı, üzerindeki açma düğmesi ile açın.
- ❖ Flowmetrelere O₂ (Oksijen)ve N₂O (Azot) gazlarının gelip gelmediğini kontrol edin.
- ❖ Cihazın self test ve gaz kaçağı kalibrasyonu yapın.
- ❖ Balonu gaz kaçağı yönünden kontrol edin.
- ❖ Cihazın kanister soda – Lime ile dolu olmasına ve temiz olmasına dikkat edin.
- ❖ Vaparızörlerin inhalasyon ajanıyla dolu olmasına dikkat edin.
- ❖ Hastaya hava akışını sağlayan hasta devresini bağlayın, doktorunuzun istediği ventilasyon modunu ayarlayarak onaylayın.
- ❖ Vaka sonrası cihaz stand-by konumuna alınarak kullanılan devreler ve filtreler değiştirilip gereken temizlik yapılarak bir sonraki vakaya hazır bir durumda bırakılır.
- ❖ Cihaz kullanmadığı zamanlarda stand-by konumunda bırakılır.