



BESLENME POMPASI KULLANIMI

- ❖ Beslenme pompası fişe takılır.
- ❖ Beslenme pompasına uygun set seçilir. Set klemplenir.
- ❖ Beslenme ürünü setin içine konur.
- ❖ Set cihazın üzerinde gösterildiği şekilde cihaza yerleştirilir. Set bölmesi kapağı kapatılır.
- ❖ Setin klempı açılır.
- ❖ Beslenme pompası ayarlama tuşu sağa çevrilerek açılır.
- ❖ Beslenme pompası ayarlama tuşu sağa çevrilerek sırası ile basamaklar izlenir ve toplam verilecek besin miktarı ve saatte gidecek miktar ayarlamaları yapılır. Ayarlamalar sonrası cihaz üzerindeki "Damla" işaretine basılarak set içerisine besin yüklemesi yapılır.
- ❖ Setin diğer ucu feding tüpe takılır ve ayarlama tuşu sağa çevrilerek "Run" seçilir ve cihaz başlatılır. Beslenmeyi duraklatmak için ayarlama tuşu sağa çevrilerek "Hold" seçilir ve beslenme duraklatılır.
- ❖ Seti otomatik yıkamak için ayarlama tuşu sağa çevrilerek "Clear Dose" seçilir ve cihaz yıkamayı gerçekleştirir.
- ❖ Beslenme işleminin bitmesinin ardından cihazı kapatmak için ayarlama tuşu sola kaydırılarak "Off" seçilir ve cihaz kapatılır.
- ❖ Cihaz fişten çıkarılır.
- ❖ Kullanım sonrası uygun temizliği yapılır ve kaldırılır.