



ALÇI KESME MOTORU KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişi takılır ve priz açılır.
- ❖ Kesilecek alçıya doğru tutularak cihaz açılır.
- ❖ İşlem sonrası cihaz kapatılarak bıçak üzerinde kalan kalıntılar temizlenir.
- ❖ Daha sağlıklı çalışması için cihazın kesme bıçağının körelmesi durumunda yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
- ❖ Bıçak değişimi Biyomedikal Bölümü tarafından yapılmalıdır.