



BEBEK TARTISI KULLANIMI

- ❖ Ön paneldeki açma kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Dijital göstergenin sıfırlanmasını beklenir.
- ❖ Tartının üzerine kağıt havlu serilmelidir.
- ❖ Bebeğin çıplak tartılmasına dikkat edilmelidir.
- ❖ Bebek tartılırken bebeğe dokunulmamasına dikkat edilmelidir.
- ❖ Tartının ölçüm sonrası uygun şekilde temizliği yapılmalıdır