



VAKUM FLOWMETRE CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın atık kavanozunun temiz olup olmadığı kontrol edilir.
- ❖ Cihaz duvarda bulunan merkezi vakum sistemi jakına takılır.
- ❖ Atık kavanoz üzerinde bulunan 'vakum' girişi ile cihaz arasındaki bağlantı sağlanır.
- ❖ Cihaz açma/kapama tuşu yana kaydırılarak açılır.
- ❖ Uygun steril aspirasyon sondası atık kavanozu üzerinde bulunan 'patient' girişine takılır.
- ❖ Hastada kullanılmadan önce cihazın çalışması kontrol edilir.
- ❖ Hastaya uygun yöntemle aspirasyon işlemi uygulanır.
- ❖ Aspirasyon işlemi tamamlanınca cihazın hortum ve atık kavanozu temizliği yapılır.
- ❖ Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır, güç kablosu çekilir.
- ❖ Atık kavanozu temizliği sırasında, kavanoz kapağında bulunan ve kavanozun dolması durumunda atık sıvıların cihaz içerisine gitmesini önleyen emniyet valfi kesinlikle atılmamalıdır.