



ATEŞÖLÇER KULLANIMI

- ❖ Cihaz; üzerinde bulunan kızılötesi sensor sayesinde, vücudun yaydığı 5-14 μm dalga boyundaki kızılötesi ışımayı algılayarak insan vücut sıcaklığını ölçer.
- ❖ Ortam sıcaklığının 10,0 $^{\circ}\text{C}$ den küçük olduğu durumlarda ve 40,0 $^{\circ}\text{C}$ den büyük olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
- ❖ Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dahil ısıdan uzak tutulmalıdır.
- ❖ Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme yada çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.
- ❖ Ölçüm yapılırken mode olarak vücut(Body) modu seçilmelidir
- ❖ Cihazı 5 cm'lik mesafeden ölçüm düğmesine basarak alna tutun (yerleştirme için yukarıdaki resme bakın), ateş hemen görülecektir. Alında saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin.