



ACT CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Vaka ACT cihazı işlem için açılır.
- ❖ ACT tüpüne yeterli miktarda venöz ya da arter kan örneği alınır.
- ❖ Tüp cihaza takılır.
- ❖ Start tuşuna basılır.
- ❖ Cihazın kan örneğini çalışması beklenir.
- ❖ Sonuç görülür, tüp çıkartılıp tıbbi atık kutusuna atılır.
- ❖ İşlem sonrası cihaz kapatılır.