



BOY ÖLÇERLİ TARTI KULLANIMI

- ❖ Cihazı start tuşuna basıp açınız.
- ❖ Tartının üst yüzeyine çıkın ve ağırlığınızın ölçülmesi için hareketsiz durun. Vücut ağırlığınız LCD ekranda görünür.
- ❖ Boy ölçmek için ölçüm uzantısını kaydırarak boyu ölçülecek kişinin üstüne getiriniz
- ❖ Ölçüm uzantısını aşağı doğru kaydırarak boyu ölçülecek kişinin kafasının üstüne hizalayınız.
- ❖ Ölçüm uzantısının gösterdiği noktaya bakarak ölçüm sonucunu kaydediniz.