



C KOLU SKOPİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazı Açma:
- ❖ Elektrik kablosunu prize takınız
- ❖ C Kollu sistemini monitör servis masasında açınız. Sistem ön yükleme yapar.Cihaz işlem yapmaya hazırdır.
- ❖ Uygun tıbbi uygulama programı seçilir. Seçilen işlem modu sembol olarak gösterilir
- ❖ C Kollunun hazır olduğu durum çubuğunda gösterilir. Sağ ayak ile basılarak floroskopi yapılır.
- ❖ Ana menüde Patient>Save LSH Scane tuşuna basılarak kaydedilir. Ana menüde Patient>End Exam tuşuna basılarak işlem sonlandırılır.
- ❖ Cihazı Kapama:
- ❖ C Kollu sistemin sıfır konuma taşınması ve orada bırakılması gerekir. Tüm frenler kilitlenir.
- ❖ Üniteyi monitör servis masasında veya C-kollu sisteminden kapatınız.
- ❖ Görüntüleme sistemi uyku moduna geçirilir. Ekrandan OPTION > END SOFTWARE> SHOUT DOWN ile uyku moduna geçer.Tekrar işler hale gelmesi 45sn sürer. 13. Kez kapatıldığında sistem kendini otomatik kapar. Tekrar açılması 3 dakika sürer.
- ❖ Monitör servis masasının arkasındaki kabloları toplayınız. C Kollu taşınmaya hazırdır.