



DEFİBRİLATÖR KULLANIMI

- ❖ Hasta sırt üstü yatırılır.
- ❖ Hasta EKG kablolarının bağlama yerlerine jel sürülür.
- ❖ Cihazın açma kapama düğmesi açık konuma getirilir.
- ❖ Cihaz istenen joule değerine getirilir.
- ❖ Kaşıklara jel sürülür ve şarj olana kadar beklenir.
- ❖ Kaşıklar hastanın uygun yerleri hariç temas ettirilmez.
- ❖ Kaşıkların üzerindeki düğmelere aynı anda basılır ve uygulama yapılır.
- ❖ Uygulama bitiminde cihaz kapatılır, uygun dezenfektan maddelerle temizlenir.
- ❖ Günlük şarj olup olmadığı cihaz açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.
- ❖ Şarj bitince güç kablosu toprak hatlı prize takılır, şarj dolu konuma gelince güç kablosu prizden çekilir.