



DİJİTAL RÖNTGEN CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazı kullanmadan önce etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
- ❖ İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır .
- ❖ On-off düğmesine basılarak cihaz açılır.
- ❖ Elektrik akımı ve cihaz üzerindeki ve cihaza ait parçalar kontrol edilir.
- ❖ Dijital röntgen cihazında cihaza bağlı bilgisayarda hastanın bilgileri kaydedilir.
- ❖ Konvansiyonel flat panel dedektörlü röntgen cihazında dedektörün çekim yapılmadığı zamanlarda şarjda olmasına dikkat edilir.
- ❖ Görüntülerin PACS sistemine iletilmesi sağlanır.
- ❖ Radyografi işleminin çeşidine bağlı olarak hastanın cihazdaki konumu belirlenir.
- ❖ Kurşun bariyer arkasına geçilir, tuşlama butonuna basılarak hastanın filmi çekilir.
- ❖ Mesai bitiminde on-off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.