



EKG CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- ❖ EKG çekimi yapılacak hasta bilgilendirilir.
- ❖ Hasta sırt üstü yatırılır üzerindeki madeni eşyalar uzaklaştırılır (küpe, yüzük, saat vb.).
- ❖ Elektrotlar uygun şekilde bağlanır.
- ❖ Cihazın açma/kapama anahtarı açılır.
- ❖ Uygun mod seçilir, start düğmesine basılarak çekim yapılır.
- ❖ İşlem bittiğinde elektrotlar hastadan sökülür.
- ❖ EKG kabloları dairesel olarak toplanır.
- ❖ Cihazı açma/kapama anahtarından kapatılır.
- ❖ EKG cihazı kullanıma hazır durumda bırakılır.
- ❖ Günlük olarak, şarj olup olmadığı açıp kapatılarak batarya göstergesinden kontrol edilir.