



ENDOSKOP YIKAMA CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihaza Dezenfektan Konulması
- ❖ Kontrol paneli üzerindeki MODE SET bölümünde bulunan tuşa MANUEL yazılı led yanıncaya kadar Birkaç sefer basılır. Hazırlanmış olan dezenfektan endoskopi cihazı konulan hazneye dökülür(2adet Opaster, her biri 5 litre) ve panel üzerindeki RETANK tuşuna 2 DEFA basılır. Haznede bulunan dezenfektan kendi tankına dolar. Bu işlem bittikten sonra MODE SET tuşuna AUTO yazılı led yanıncaya kadar basılarak işlem sonlandırılır.
- ❖ Cihaza Deterjan Konulması Cihazın endoskopi cihazı konulan haznesinin içinde deterjan/dezenfektan (DD1) yazan kapak açılarak, hazırlanmış olan deterjan/dezenfektan boşaltılır (her 24 saat bir defa değişir). Deterjan/enzimatik miktarı 5 cc(ml). Deterjan / dezenfektan 1 litre su ile karıştırılır (DD1)
- ❖ Cihazın Programlanması Kontrol paneli üzerindeki MODE SET bölümünde bulunan tuşa MR SET yazılı led yanıncaya kadar Birkaç sefer basılır. Paneldeki lcd ekranda görülen zaman birimleri WASHING ve DISINFECTANT tuşlarına basılarak istenilen zaman ayarlanır bu işlem tamamlandıktan sonra MODE SET tuşuna AUTO yazılı led yanıncaya kadar basılarak işlem sonlandırılır.
- ❖ •A programı Bu programda yıkama, deterjan / enzimatik, ,durulama, dezenfektan, durulama hava vererek yıkama işlemi gerçekleştirilir.

- ❖ •B programı Bu programda yıkama- deterjan/dezenfektan-duruluma-hava vererek dezenfektansız yıkama işlemi gerçekleştirilir.
- ❖ •C programı Bu Programda Yıkama –Dezenfektan –Durulama-Hava vererek yıkama işlemini yapar.
- ❖ • D programı Bu programda tek kullanımlık dezenfektanlar için geçerlidir. Cihazın kontrol paneli üzerindeki program tuşuna lcd ekranda timer set başlıklı menü gelinceye kadar birkaç defa basılır. Menü ekranda görüldüğünde wash-deter-dısınf yazılarının altındaki zaman miktarları panel üzerindeki washing-detergent-dısınfektant tuşlarıyla değiştirilir. Yapılan bu ayarlar tüm programlar tüm programlar için aynı olacaktır.
- ❖ Ayarlanabilir Zaman Süreçleri
- ❖ • Wash: 10 saniye–5 dakika
- ❖ • Detergent: 10 saniye -1 dakika
- ❖ • Disinfectant: 5 dakika – 15 dakika
- ❖ Kaçak (Leakage) Testi Yapılması
- ❖ Kontrol panelindeki MODE SET bölümünde bulunan tuşa MANUAL yazan led yanıncaya kadar Birkaç sefer basılır panelin sol tarafında bulunan sipiral hava hortumunun aparatı cihaza takılır ve paneldeki LEAKG tuşuna uzunca basılarak test çalıştırılır bu işlem bittikten sonra MODE SET tuşuna AUTO yazılı led yanıncaya kadar basılarak işlem sonlandırılır.
- ❖ Cihazın Çalıştırılması
- ❖ Kontrol paneli üzerinde bulunan START tuşuna basılarak yıkama başlatılır. Elektrik kesildiğinde START ışığı yanıp sönmeye başlar işleme kaldığı yerden devam etmesi için START tuşuna bir kere basılır.

- ❖ Dezenfektan Tankının Boşaltılması
- ❖ Kontrol paneli üzerinde bulunan MODE SET bölümünde bulunan tuşa MANUAL yazan led yanınca kadar Birkaç sefer basılır panel üzerindeki DISCHARGE tuşuna uzunca basıldıktan sonra dezenfektan tankında bulunan solüsyon hazneye dolar ve otomatik olarak dışarı atılır. Tankta kalan az miktarda solüsyon alt kapak içindeki vanadan boşaltılır. UYARI: Cihazın arkasında bulunan filtreleri rutin olarak haftada bir kontrol ediniz. Suyun kirliliğine veya kullanıma bağlı olarak 3 ayda bir filtreler değiştirilmelidir.