



FLASH OTOKLAV KULLANIMI

- ❖ Flash program hastaya hemen kullanılması gereken, yedeği olmayan ve temizlenmiş aletlerin paketlenmeden steril edilmesi için uygulanır.
- ❖ Paketli material ve konteynerler ile implant materyali flash programda steril edilmez
- ❖ Flash program, zaman kazanmak veya ek alet/set teminine alternatif olarak kullanılmaz.
- ❖ Aletler otoklava konmadan önce dekontamine edilir.
- ❖ Flash program kullanılarak steril edilir.

Porsuz, lümensiz material 132 °C de 3 dakika

Porlu, lümenli material 132 °C de 10 dakika (ön vakumlu ise 132 °C de 4 dakika)

- ❖ Steril malzeme sterilizatörden hastaya taşınırken kontaminasyon engellenmelidir, Flash otoklavı ameliyat masasına en yakın noktada bulundurulur.