



## FLOWMETRE KULLANIMI

- ❖ Oksijen Flowmetresi Oksijen girişine takılır.
- ❖ Oksijen Flowmetrenin vanası açılır.
- ❖ Flowmetre nemlendirme kabındaki distile su seviyesi kontrol edilir.
- ❖ Oksijen maskesi ya da nazal kanül hastaya bağlanır.
- ❖ Flowmetre ayar düğmesinden oksijen miktarı ayarlanır.
- ❖ Hastaya oksijen verme işlemi bittikten sonra vana kapatılır.
- ❖ Oksijen girişleri ve manometreden tüp oksijen miktarı kontrol edilir; herhangi bir arıza durumunda gerekli birimlere bildirilir.
- ❖ Oksijen tüpü bitmişse değiştirilir, kullanıma hazır halde bırakılır.
- ❖ Günlük olarak Flowmetrenin bakımı, Sterilizasyon Ve Dezenfeksiyon Talimatı doğrultusunda yapılır ve günlük nemlendirme kabındaki distile su değiştirilir.
- ❖ Yeni hasta yattığında Flowmetrenin nemlendirme kabındaki su yeni konulur.