



FOTOTERAPİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
- ❖ Cihaz ON düğmesine basılarak açılır, lambaları kontrol edilir.
- ❖ Kuvöz çalıştırılarak ısı ayarlanır. Oda ısı yüksekse 30 °C de, oda ısı normal ise 32-33°C ye ayarlanır. Bebek çift foto alacaksa fotoların ısı düşünülerek kuvöz ısı minimum 28°C de tutulur.
- ❖ Fototerapi cihazı kuvözün üst kısmına yerleştirilir.
- ❖ Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
- ❖ Kuvöz on düğmesine basılarak çalıştırılır.
- ❖ Fototerapi alacak bebeğin genel bakımı(ağız,göz,göbek) yapılır. ANS alınır, emmesi değerlendirilir. Bebek kuvöze bebek bezi bağlanarak çıplak olarak yerleştirilir. Bebeğin gözüne fototerapi gözlüğü takılır. Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi sarılık izlem formuna bebekle ilgili değerler kaydedilir ve bu değerler doğrultusunda bebeğin tedavisine yön verilir.
- ❖ Çocuğun pozisyonu 2 saat aralıklarla değiştirilir.
- ❖ İşlem bittikten sonra çocuk kuvözden çıkarılır.
- ❖ Lambanın ışık şiddeti ölçülür ya da belli aralıklarla değiştirilir.
- ❖ Fototerapinin fişi prizden çıkarılır. Cihaz yerine kaldırılır.