



## FOTOTERAPİ TÜNEL KULLANIMI

- ❖ Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
- ❖ Cihaz ON düğmesine basılarak açılır, lambaları kontrol edilir.
- ❖ Kuvöz çalıştırılarak ısı ayarlanır.
- ❖ Fototerapi cihazının fişi prize takılır.
- ❖ Kuvöz on düğmesine basılarak çalıştırılır.
- ❖ Fototerapi alacak bebeğin genel bakımı (ağız, göz, göbek) yapılır. ANS alınır, emmesi değerlendirilir. Bebek kuvöze bebek bezi bağlanarak çıplak olarak yerleştirilir. Bebeğin gözüne fototerapi gözlüğü takılır. Laboratuvar izlem formuna bebekle ilgili değerler kaydedilir ve bu değerler doğrultusunda bebeğin tedavisine yön verilir.
- ❖ Çocuğun pozisyonu 2 saat aralıklarla değiştirilir. Çocuğun ısı takibi yapılır.
- ❖ İşlem bittikten sonra çocuk kuvözden çıkarılır.
- ❖ Lambanın ışık şiddeti ölçülür yada belli aralıklarla değiştirilir.
- ❖ Fototerapinin fişi prizden çıkarılır. Cihaz yerine kaldırılır.