



HASTA LİFTİ KULLANIMI

- ❖ Hasta taşıma lifti aküsü kullanma talimatına göre şarj edilir
- ❖ Uzaktan kumanda pili kontrol edilir
- ❖ Hasta yatağında sağa veya sola yan yatırılır
- ❖ Siling ortadan katlanarak alt boşluğu hastanın kuyruk sokumuna gelecek şekilde yerleştirilir
- ❖ Hasta diğer tarafa çevrilerek katlanan kısmın diğer yarısı açılır ve her iki tarafın yatağa tam yerleştiğinden emin olunur
- ❖ Alt askı aparatı sağdan gelen sola, soldan gele sağa olacak şekilde bacak arasına her iki bacakta geçirilir
- ❖ Alt askı aparatları çapraz olarak lift askı aparatına takılır
- ❖ Silingin üstündeki farklı renkler hastanın lift üzerinde dik veya yatay pozisyonda oturmasını sağlamak içindir
- ❖ Alt kısımdaki askı aparatları kırmızıya üst kısımdaki askı aparatları ise siyaha takıldığında hasta geriye doğru yatar vaziyette taşınır. Tam tersi durumda ise hasta dik yani oturur pozisyonda taşınır
- ❖ Uzaktan kumanda ile hasta güvenli bir şekilde kaldırılıp başka bir ortama taşınır
- ❖ Askı aparatları liftten çıkarılır
- ❖ Bacaklara geçirilen alt askı aparatı düzeltilir ve arkadan siling çekilere kolayca çıkarılır.