



HAVALI YATAK MOTORU KULLANIMI

- ❖ Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- ❖ Havalı yatak ve havalı yatak motoru bağlantısı yapılır.
- ❖ Yatağın düzgün şekilde şiştiği gözlemlenir.
- ❖ Yatak hasta yatağına yerleştirilir ve hastayla teması önlenecek şekilde nevresimle örtülerek kullanıma hazır hale getirilir.
- ❖ Kullanım bittikten sonra havalı yatak havası indirilerek düzgün şekilde toplanır.
- ❖ Dezenfektanlandıktan sonra tekrar kullanılmak üzere kaldırılır.