



HEMODİYALİZ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Makine on-off tuşlarıyla açılır.Yaklaşık bir dakika cihazın kendini test etmesi beklenir.
- ❖ Makine işlem öncesinde uygun set ile setlenir.Set %9 NaCl 1000ml solüsyonu ile yıkanarak diyaliz işlemine hazırlanır.
- ❖ Cihazın arter ucu izotonik seruma bağlanır, ven ucu ise boş bir torbaya bağlanır. Diyalizörde hava kabarcıkları gözlenmeyene kadar seti doldurma işlemi devam eder.
- ❖ Test ışığı yandığında mavi ve kırmızı pipetler diyalizasyona atılır (mavi pipet mavi bidona, kırmızı pipet kırmızı bidona atılır.)
- ❖ Diyaliz start'a basılır.Makinanın sağ yanındaki by-pass kapağı acılır.halofiber denilen ve süzme işleminin yapıldığı yeri by-pass kapağı takılır.
- ❖ İşlem başladıktan sonra ven haznesine kan geldiğinde setin ven ucu hastanın ven damarına bağlanır ve klemp açılır.
- ❖ Doktorun o gün uygun gördüğü süre ve hastanın kilosu cihaza girilir.
- ❖ Doktorun istemine göre antikoagülan yapılır.
- ❖ Diyaliz bittikten sonra makinenin iç ve dış dezenfeksiyonları yapılarak cihaz kapatılır.