



İDRAR ANALİZ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın açma-kapama düğmesinden cihaz açılır.
- ❖ Cihazın kendini kalibre etmesi beklenir.
- ❖ Kullanılacak olan strinin miadı kontrol edilir, uygun değilse gerekli kişi bilgilendirilir.
- ❖ Çalışılacak numunenin barkodu okutulur.
- ❖ İdrar bardakların üzerlerine birer adet miadı kontrol edilmiş strip daldırılır.
- ❖ Strip cihaza yüklenir ve cihaz "start" tuşuna basılarak çalıştırılır.
- ❖ Cihazın hazırlayıp otomasyon sistemine gönderdiği sonuç kontrol edilerek onaylanır.
- ❖ Gün sonunda cihaz açma-kapama düğmesinden kapatılır.