



İNFÜZYON POMPASI KULLANIMI

- ❖ Cihazı Cihazın güç kablosu topraklı prize takılır.
- ❖ Cihaz açma/kapama anahtarından açılır.
- ❖ İnfüzyon pompa seti veya perfüzyon enjektörü seruma takılır ve setin içindeki hava çıkartılır.
- ❖ Serum seti uygun bir şekilde infüzyon, perfüzyon pompasına yerleştirilir.
- ❖ Serum setinin ucu damar yoluna takılır.
- ❖ Uygun doz ve süre ayarlanır.
- ❖ Start düğmesine basarak hastaya sıvı gönderilir.
- ❖ İşlem bittikten sonra set çıkartılır.
- ❖ Cihaz açma/kapama anahtarından kapatılır.
- ❖ Cihazın temizliği yapılır, kullanıma hazır halde şarjda bırakılır.