



KAN KÜLTÜR CİHAZI KULLANIMI

❖ YENİ ŞİŞE GİRİŞİ

“Home Rotor Key” tuşuna basılır (ekranın sağ alt tarafında),

Kapak açılır, şişe giriş tuşuna basılır (ekranın sol alt tarafında),

Şişe barkodu cihaza okutulur,

Yeni şişe konacaksa barkod okutularak işlemlere devam edilir,

En son şişeden sonra “kapı” işaretine basılarak işlem tamamlanır.

❖ POZİTİF ŞİŞE ÇIKARTMA

“Home Rotor Key” tuşuna basılır. (ekranın sağ alt tarafında)

Kapak açılır. Soldan 2. Tuş olan “pozitif şişe çıkartma” tuşuna basılır

Cihazın göstermiş olduğu kuyucuktaki şişe çıkartılır

Şişe barkodu cihaza okutulur

❖ NEGATİF ŞİŞE ÇIKARTMA

Home Rotor Key” tuşuna basılır. (ekranın sağ alt tarafında),

Kapak açılır. Soldan 3. Tuş olan “negatif şişe çıkartma” tuşuna basılır,

Cihazın göstermiş olduğu kuyucuktaki şişe çıkartılır,

Şişe barkodu cihaza okutulur.