



KAVİTRON KULLANIMI

- ❖ YENİ Uçlar hasta ağızına her yerleştirildiğinde, dudaklar, yanak ve dil ekarte edilerek aktive edilen ucun kaza ile (uzun süreli) teması engellenmelidir.
- ❖ Çalışma için ultrasonik güç seviyesini belirlemek amacıyla Güç Seviyesi Kontrolünü çeviriniz.
- ❖ Saat yönünde çevrildiğinde sistem gücü artar.
- ❖ Güç seviyesi kontrolün tüm menzili boyunca artacaktır.
- ❖ Piyasemeni bir lavabo veya kap üzerinde tutunuz.
- ❖ Sistemi çalıştırmak için ayak kumanda pedalına basınız. Çalışma ucuna kadar sıvının ulaştığından emin olunuz. Seçilen güç ayarı için yeterli irrigasyon sağlayabilmek için su akışını ayarlayınız. Yüksek akış oranları daha soğuk irrigasyon sağlar.
- ❖ Diş ile uç arayüzünü soğutmak için yeterli miktarda sıvı sağlanması amacıyla "Maksimum Seviye/Boost" modunda (ayak kumanda pedalına tam olarak basılmış konumda) sistemdeki irrigasyon miktarının ayarlanması gerekli olabilir.
- ❖ Genellikle, ultrasonik scaling işleminin "tüy kadar hafif dokunuşlar" ile yapılması önerilmektedir. Aktive edilen ucun hareketi ve irrigasyon sıvısının akustik etkileri, çoğu vakada en zor tartarları bile uzaklaştırmak için yeterli olmaktadır.
- ❖ Kavitrone Uç Verimlilik indikatörünü kullanarak kavitrone ultrasonik ucunu periyodik olarak aşınma açısından kontrol ediniz.
- ❖ Sistemin Güç Seviyesini, uygulama ve seçilen uç için etkili olan en düşük güç ayarına getiriniz.
- ❖ Kullanılmış ultrasonik ucu çıkarınız. Verilen kavitrone ultrasonik uç enfeksiyon kontrol talimatlarında tarif edilen prosedürünü takip ederek temizleyip steril ediniz.
- ❖ Piyasemeni bir lavabo veya kap içerisinde tutarak kurulum işlemlerini arındırma/Purge fonksiyonunu çalıştırınız.
- ❖ Arındırma işlemi tamamlandıktan sonra, sistemi KAPALI (0) konuma getiriniz. Steri-Mate piyasemeni çıkarıp, cihaz ile birlikte verilen kitapçıkta tarif edilen prosedürünü takip ederek temizleyip steril ediniz.
- ❖ Nemli dezenfektanlı bir bezle silinerek temizliği yapılır.
- ❖ Fiziki temizliği yapılır. Çalışması kontrol edilir.