



## KOTER CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Fişini prize tak
- ❖ Monopolar koter için çalıştırma düğmesini aç.
- ❖ Koter plağını hastanın operasyon bölgesine yakın olmayan, kılsız, doğru boyda, temiz ve kuru alana ,kalın kas yığınlarının üzerine, iyi temas edecek şekilde yerleştirilmelidir.
- ❖ Koter ucunu cihaza yerleştir.
- ❖ İşlem bittikten sonra cihazı kapat.
- ❖ Bipolar koter için çalıştırma düğmesini aç.
- ❖ Koter ayağını kullanıcıya ver.
- ❖ Bipolar koter ucunu cihaza yerleştir.
- ❖ İşlem bittikten sonra cihazı kapat.