



KÜVOZ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Küvözün fişi prize takılır.
- ❖ Sağ yan taraftaki power "0" ,"I" yazan düğmeye basılarak açılır.
- ❖ Sağ yan tarafta "patient probe" yazan bölüme ısı probu takılır ve ucu bebeğin karın bölgesine yerleştirilir.
- ❖ Bebek haftası, kilosu, vücut ısısına göre küvez ısı ayarlanır.
- ❖ Aynı yerde "Aoxilary Air Probe " yazan yerine hava probu takılarak küvöz içi nem oranına bakılır.
- ❖ Sıcaklık ayarlamak için sıcaklık ayar tuşu kullanılır.
- ❖ Nem ayar tuşu nem ayarı için kullanılır.
- ❖ Hava modu tuşuna bir sn boyunca basılı tutulur. Hava modu seçilir ve ekranda görünür.
- ❖ Cilt modu tuşuna bir sn boyunca basılı tutulur. Cilt modu seçilir ve ekranda görünür.
- ❖ Çıkış tuşu: devam etmekte olan işlemler sonlandırılır.