



LARİNGOSKOP KULLANIMI

- ❖ Kullanımından önce mutlaka ışığının yanıp yanmadığı kontrol edilir. Yanmıyorsa veya ışık zayıf ise pilleri veya ışık kaynağı/lambası değiştirilir
- ❖ Hasta için uygun boyutta blade (uç kısım) takılır.
- ❖ Laringoskop hazır halde iken sol elle handle'dan (sapından) tutulur.
- ❖ Hastanın başı ekstansiyona getirilir.
- ❖ Laringoskop yardımıyla endotrakeal tüp sağ elle trakeaya yerleştirilir.
- ❖ Zor entübasyonlarda tüp için stile kullanılır.
- ❖ Entübasyondan sonra blade yıkanır, dezenfekte edilir ve kurulanır.
- ❖ Blade'ler %2 gluteraldehit karışımında 20 dk bekletilmelidir.
- ❖ Blade'ler bol su ile durulandıktan sonra kapalı kapta saklanmalıdır.
- ❖ Handle kesinlikle suya batırılmamalı, hazırlanmış %70'lik etil alkol solüsyonla silinmelidir.
- ❖ Laringoskop cihazı kullanılmadığı sürece iki haftada bir bakım işlemi tekrar edilmelidir.