



NEBULİZATÖR KULLANIMI

- ❖ Cihaz hasta başına getirilir ve fişe takılır.
- ❖ Nebülizatör ile uyumlu set hazırlanır ve doktor orderındaki ilaç hazneye yerleştirilir.
- ❖ Setin boşluktaki ucu nebülizatör üzerindeki giriş bölümüne takılır.
- ❖ Setin maskeli ucu hastanın yüzüne yerleştirilir.
- ❖ Cihazın on-off düğmesine basılır. Cihaz çalıştırılır.
- ❖ İşlem sonunda on-off düğmesi ile cihaz durdurulur.
- ❖ Set cihazdan çıkarılır.
- ❖ Cihaz fişten çıkarılır.
- ❖ Temizliği yapılır.