



NST CİHAZI KULLANIMI

- ❖ NST Cihazının fişi prize takıl olarak bulundurulur.
- ❖ Açma kapama düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.
- ❖ .NST Cihazında NST kağıdı bulunur.
- ❖ Anne yatağa alınır. Annenin bel hizasına iki adet nst kemeri serilir.
- ❖ NST Cihazının fetal kalp sesi probuna bir miktar jel dökülür bebeğin kalp atışlarının en güzel duyulduğu bölgeye yerleştirilir ve prob NST kemeri ile sabitlenir.
- ❖ NST Cihazının kontraksiyon probu anne karnına, gebenin aylık durumuna göre yerleştirilir ve prob NST kemeri ile sabitlenir.
- ❖ Yazıcı düğmesine basılarak NST kağıdından çıktı alınır.
- ❖ Sorumlu Hekim tarafından NST sonucu kontrol edilir ve bulgulara göre hasta yönetimi yapılır.