



ODYOMETRİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ KBB ve çocuk polikliniğinde muayene olan hastalara doktor istem yaptıktan sonra randevu verilerek ölçüm için çağırılır.
- ❖ Hasta ölçüm için geldiğinde sessiz bir ortama alınır.
- ❖ Hastaya test tekniği ve neler yapması gerektiği anlatılır.
- ❖ Hava yolu işitme eşiği için sağ tarafa kırmızı, sol tarafa mavi şerit gelecek şekilde kulaklık takılıp test uygulanır.
- ❖ Kemik yolu ölçümü için kemik vibratörü takılır ve test uygulanır.
- ❖ Hastaya verilen sesi algıladığı zaman geri bildirim yapması öğütlenir.
- ❖ Çeşitli tonlarda sesler verilerek hava ve kemik yolu işitme aralıkları ölçülür.
- ❖ Alınan veriler odyolojik bulgular formuna kaydedilerek değerlendirme için doktora yönlendirilir.
- ❖ İşlem bittikten sonra cihaz temizlenerek bir sonraki kullanım için hazır tutulur.