



OTOKLAV CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Otoklav açma – kapama düğmesi açılarak cihaz çalıştırılır.
- ❖ Steril edilecek malzemeler sıkışık olmayacak şekilde yerleştirilerek, kapak sıkıca kapatılır.
- ❖ Ön panel kumanda ünitesindeki dokunmatik ekrandan malzemenin cinsine göre program seçilir.
- ❖ Sistem kontrol bilgileri tamamlandıktan sonra program başlatılır ve start düğmesine basılır.
- ❖ 45 dakika sonra sterilizasyon tamamlanır ve bitiş sinyali çalmaya başlar.
- ❖ Program bitiminden 5 dk sonra kapak açma düğmelerinden açılarak, malzemeler cihaz içerisinde 10 dk bekletilir ve ilgili birimlere dağıtılmak üzere kaldırılır.
- ❖ Printerden çıkan sterilizasyona ait bilgiler arşivlenir. Yükleme yapan kişi sterilizasyon bilgilerini kayıt eder.
- ❖ Cerrahi Malzemeler 134°c` de, plastik malzemeler 121°c ` de steril edilir.