



ÖRDEK YIKAMA CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın kapağı yanındaki açma/kapama düğmesinden açılır.
- ❖ Yıkanacak malzeme kirlilik düzeyine ve malzeme cinsine göre uygun program seçilir.
- ❖ Yıkanan malzemeye ve kirlilik oranına göre deterjan otomatik verilebilir veya deterjan dozajı ayarlanabilir.
- ❖ Malzemeler çoksa cihazın kapağındaki yerine oturtulabilir.
- ❖ Cihazın kapağı kapatıldığında sürgü ve ördek otomatik olarak boşalır önceden boşaltmaya lüzum yoktur.
- ❖ Sürgüler arka-sağ tarafındaki yıkama başlığına geçirilir.
- ❖ Yıkama kaseleri cihazın kapağındaki sürgü yerine yerleştirilir.
- ❖ Program bittiğinde yeşil Led yanar ve kapı kilidi açılır.
- ❖ Program biter bitmez boşalması gerekiyorsa; malzemeler sıcak olacağı için dikkatli boşaltınız.
- ❖ Program boyunca cihazın kapağı kilitlidir açmaya çalışmayınız.