



PLAZMA KULLANIMI

- ❖ Alınacak Cihazı kullanabilmek için ekranda "STERİLİZATÖR UYGUN" yazısını görmemiz gerekir. Eğer ekranda "Cerrahi Aletleri Kurulayın Ve Yüksek Basıncılı Hava Tabancası İle Temizleyin. Yerleştirme Yaparken Kazan İçindeki Elektrotlara Dokunmayın" yazısı varsa cihaz kullanıma hazır demektir yükleme yapılabilir.
- ❖ Kullanıma hazır olan cihazın ekranından mavi renkli ok (aç) tuşuna basılarak yada pedal yerine ayak gösterilerek kapağı açılır. Her yükte kimyasal indikatör mutlaka koyulmalı gerekiyorsa biyolojik indikatörde koyulmalı.
- ❖ Malzemeler cihaza yerleştirildikten sonra cihazın mavi ok (kapat) tuşuna basılarak cihazın kapağı kapatılır.
- ❖ Kapağı kapanan cihazın hızlı, normal ve süper programlarından yüke uygun olan birisi seçilerek yeşil renkli(başla) tuşuna basılır.
- ❖ Eğer lümenli uzun aletler var ise mutlaka süper döngüde çalıştırılır.
- ❖ Cihazın sterilizasyon süresi hızlı döngüde yaklaşık 18 dakika, normal döngüde yaklaşık 28 dakika süper döngüde ise yaklaşık 38 dakikadır.
- ❖ Cihaz sterilizasyonu bitirdikten sonra yazıcı kısmından bir kâğıt çıktı verir. Çıktı üzerinde sterilizasyon süresi ve aşamalarına ait bilgiler vardır. Bu bilgiler kontrol edilir. Çıktı üzerinde sterilizasyonun tamamlandığını gösteren sterilizasyon başarılı yazısı özellikle kontrol edilir.