



POSET KAPAMA CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın enerji kablosunun takılı olduğunu kontrol ediniz. Ve "AÇ,KAPA(Ö-1)"düğmesine basarak "AÇIK (1)" konumuna getiriniz.
- ❖ Cihazın kapatma yapabilmesi belli bir sıcaklık değerine ulaşması için gerekli süreyi belirleyiniz.
- ❖ Cihaz gerekli sıcaklık değerine ulaştıktan sonra poşet kapatma yuvasına kapatacağınız sterilizasyon paketini yerleştiriniz yan tarafında bulunan kolu aşağıya indiriniz.
- ❖ Kapat işlemi tamamlandığında cihaz üzerinde bulunan düğme kırmızı renge dönüşerek ses çıkaracaktır.
- ❖ Cihazın etkin kapama yapabilmesi için poşetlerin içerisine malzeme konulduktan sonra kalan kapatma boşluğunun çok kısa olmamasına dikkat ediniz. Kısa olması durumunda cihaz kapatma yapmayabilir.
- ❖ Gün bitiminde cihazı "AÇ-KAPA(0-1)" butonu yardımıyla "KAPALI (0)" konumuna getiriniz.