



PULSEOKSİMETRE KULLANIMI

- ❖ Cihazı, LCD ekran yukarı gelecek şekilde konumlandırın.
- ❖ Parmağınızı, tırnak yukarı gelecek şekilde konumlandırın.
- ❖ Cihazı mandal gibi açın ve parmağınızı cihazın içine yerleştirin.
- ❖ Butona basın ve cihaz çalıştıktan sonra değerleri ekrandan izleyin.
- ❖ Cihazı hangi parmakta kullandığınız önemli değildir. Pulse oksimetreler genellikle işaret parmağında kullanılır. İşaret parmağında yara veya şekil bozukluğu varsa diğer parmaklarda da kullanılabilir.
- ❖ Parmak doğru bir şekilde cihaza yerleştirilmezse ölçüm sonuçları yanlış olabilir.
- ❖ Cihazı açıp parmağınızı cihaza yerleştirmedeniz, ekranda "Finger Out" uyarısı görünür ve cihaz 1-2 saniye içinde otomatik olarak kapanır.
- ❖ Parmağınızı doğru şekilde konumlandırın ve cihazı açmak için butona basın. İşlemi doğru yaptıysanız parametreler ekranda görünecektir.
- ❖ Parmak tipi pulse oksimetre aleti kullanımı esnasında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına titizlikle dikkat edilmelidir.