



TOMOGRAFİ CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın Kullanımına Başlamadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar
 - Klimalar açık olmalıdır.
 - Cihazın etrafında herhangi bir toz ve kirlenme olmamasına dikkat edilmelidir.
 - İnfeksiyon kurallarına uygun çevre şartları oluşturulmuş olmalıdır.
 - Sıcaklık değerlerinin firma tarafından belirlenen değerlere uygunluğu kontrol edilmelidir.
- ❖ Sistemin Açılması:
 - Ana şalter açılır.
 - Cihaz kasası açılır ve power/on yapılır.
 - Gerekli kalibrasyon yapılır.
 - Hastaya uygun pozisyon verilir.
 - Çekim protokolü uygulanır
 - Film/CD basımı yapılır.
- ❖ Sistemin Kapatılması:
 - Cihaz Shutdown system yapılır.
 - Şalter kapatılır