



ULTRASON CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın fişi uygun şebeke voltajına (220 V topraklı prize) takılır.
- ❖ Cihazı açmak için Power düğmesine basılır.
- ❖ Ekran 3.5 MHz proba açılıncaya kadar beklenir.
- ❖ Hasta muayene masasına uygun pozisyonda yatırılır ve ultrasonik jel yardımı ile uygulamaya başlanır.
- ❖ Ölçümler ve diğer işlemler için cihazın uygun butonlarından yararlanılır.
- ❖ İşlem bitince freze butonuna tıklanarak cihaz dondurulur. Cihaz işlem sonunda Power düğmesine basılarak kapatılır.
- ❖ Cihazın günlük bakımı sorumlusu tarafından, cihaz kapalı iken nemli bir bezle tozu alınarak yapılır bitiminde cihaz kapalı iken prob temizliği yapılır.
- ❖ Cihazı sorumlusundan başkası kullanırken temizlik kurallarına riayet edilir.
- ❖ Cihazın başka bir yere taşınması için, başhekim ve sorumlusundan onay alınır.
- ❖ Cihazla ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.