



## ULTRASONİK NEBÜLİZATÖR CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Cihazın güç kablosu toprak hatlı prize takılır.
- ❖ Hasta ve yakınlarına işlem anlatılır.
- ❖ Prospektüsteki gibi nebulizatör ilaç haznesi hortumunu kompresördeki hava çıkış kanalına takılır.
- ❖ İlaç haznesine ilaç koyabilmek için hazne kapağı çıkarılır.
- ❖ Kullanılacak ilaç hazneye boşaltılır.(İlaç tüpünün açık ucu ilaç haznesinin alt kısmının içine sokulur ve tüpü parmağınızla sıkarak ilacın tamamı boşaltılır)
- ❖ İlacı sulandırmak gerekiyorsa aynı şekilde boşaltılır ve doktorunuzun söylediği miktarda distile suyu veya serum fizyolojik ilave edilir.
- ❖ İlaçlı buhar çıkışı gözle kontrol edilir.
- ❖ İlaç haznesinin kapağı tekrar kapatılır.
- ❖ Ağızlık, burunluk ya da maskenin ucu ilaç haznesinin çıkış kanalına takılır.
- ❖ Cihaz "On" konumuna getirilir ve ince bir buğunun çıktığı gözlemlenir.4.11. Cihaz sterilizasyon ve dezenfeksiyon talimatı doğrultusunda tekrar kullanılacak hale getirilir.