



### UZAKTAN ATEŞ ÖLÇER KULLANIMI

- ❖ Temassız ateş ölçer hastalığın tanısı ve izlenmesi için vücuda temasa gerek olmadan insan vücut sıcaklığını ölçmek amacıyla kullanılır.
- ❖ Çalışanlarının güvenliğinde ve ateş ölçümü cihazının kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektir.
- ❖ Cihaz; üzerinde bulunan kızılötesi sensör sayesinde, vücudun yaydığı 5-14  $\mu$ m dalga boyundaki kızılötesi ışımayı algılayarak insan vücut sıcaklığını ölçer.
- ❖ Ortam sıcaklığının 10,0  $^{\circ}$ C den küçük olduğu durumlarda ve 40,0  $^{\circ}$ C den büyük olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.
- ❖ Ateş ölçerler sudan ve doğrudan güneş ışığı dâhil ısıdan uzak tutulmalıdır.
- ❖ Ateş ölçerler düşürülmemeli, düşme ya da çarpma ile hasar görüp cam kırılmışsa kullanılmamalıdır.
- ❖ Ölçüm yapılırken mode olarak vücut(Body) modu seçilmelidir.
- ❖ Cihazı 5 cm'lik mesafeden ölçüm düğmesine basarak alına tutun (yerleştirme için yukarıdaki resme bakın), ateş hemen görülecektir. Alında saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin.
- ❖ Oda sıcaklığı önemli derecede farklı ise veya alın terli ise, ateşi kulak memesinin arkasından da ölçebilirsiniz. Saç, ter, kozmetik ürün olmamasına veya şapka takılmamasına dikkat edin
- ❖ Ölçüm yapacak kişi, tıbbi maske ve eldiven kullanarak ölçüm yapmalıdır.