



ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI KULLANIMI

- ❖ Ultrasonik yıkama cihazı seviyesine kadar su ile doldurulur.
- ❖ Doldurulan su içerisine dezenfektan/ enzimatik solüsyon % 1 konsantrasyonu sağlayacak miktarda ilave edilir.
- ❖ Ultrasonik yıkama cihazı açma/kapama düğmesinden-anahtarından açılır.
- ❖ Cihaz ısısı kullanılan dezenfektan/enzimatik solüsyon üreticisinin önerdiği ısı derecesine ayarlanır.
- ❖ Cihaz ayarlanılan sıcaklığa ulaştığında yıkama sepeti cihaz haznesine yerleştirilir.
- ❖ Yıkama süresi ayarlanır (10-15 dakika)
- ❖ Cihaz start tuşu ile başlatılır.
- ❖ Kirli aletler yıkama sepeti içine eklemli olanlar ağızları olacak şekilde yerleştirilir.
- ❖ Yıkama süresi sonunda yıkama sepeti cihaz içinden alınarak yıkanan aletler bol su ile su ile durulanır.
- ❖ Hava tabancası ile kurutulur.
- ❖ Yıkama işlemleri bittikten sonra cihaz tahliye vanası açılarak ultrasonik yıkama cihazı boşaltılır.
- ❖ Cihaz açma kapama düğmesinden kapatılır.