



## KOTER KULLANIMI

- ❖ Koter cihazının kablolarının yeterli uzunlukta olup olmadığını ve bağlantılarının doğruluğunu kontrol edilerek, cihazın fişi 220w topraklı prize takılır.
- ❖ Elektro koter cihazının plağını hastanın ekstremitelerinin (kol yada bacağının) metal ile temas edip edilmediğini kontrol edilmelidir, metal ile temas etmemelidir. Emin olduktan sonra koter plağını hastanın uygun olan ekstremitesine, dispozbil plak kullanılıyorsa yapıştırılır. Rezibil plak kullanılıyor ise plağı ekstremita ile temas edecek şekilde yerleştirilir ve hastanın ekstremitesini oynatma, kaldırma riskine karşı sabitlenerek, bağlanır.
- ❖ Cihazın ön panelindeki on / off düğmesine basılır.
- ❖ Cihaz çalışınca hasta plağının takıldığını onaylamak için "OK" butonuna basılır. Cihazın lcd ekranı cihazın ve aksesuarlarının doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını otomatik olarak kontrol eder.
- ❖ Cerrahın isteği üzere parametre dozları ayarlanır.
- ❖ Koter kalemi bağlanır ya da koter kalemi kullanılmayacaksa ayak pedalı cihaza takılır.
- ❖ Ameliyat bitikten sonra cihaz on/off anahtarından kapatılır.
- ❖ Plak hastadan ayrılır, koter kalemi çıkartılır.