



KURU HAVA STERİLİZATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_020	06.08.2012	02.01.2023	1	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

01

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



KURU HAVA STERİLİZATÖR KULLANMA TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_020	06.08.2012	02.01.2023	1	2

1. AMAÇ

Laboratuarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Kuru hava sterilizatör cihazının doğru kullanıma ilişkin ilkeleri kapsar.

3. SORUMLULAR

Laboratuarda çalışan tüm personel bu talimatın uygulanmasından sorumludur.

4. TANIMLAR:-

5. KISALTMALAR: -

6. FAALİYET AKIŞI

- 6.1. Aletler 160 derecelik ısıda steril etme süresi 2.5 saattir.
- 6.2. Aletler 170 derecelik ısıda steril etme süresi 1 saattir.
- 6.3. Aletler 180 derecelik ısıda steril etme süresi 30 dakikadır.
- 6.4. Sterilizasyon ayarlanan dereceyi gösterdikten sonra başlar.
- 6.5. Sterilizasyon süreci başladıktan sonra kesinlikle kapak açılmaz.
- 6.6. Aletler arasında ısıнын dağılması için boşluk bırakılmalıdır.
- 6.7. Kalibrasyon işlemi yılda 1 kez Biyomedikal ve Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılmalıdır.
- 6.8. Isıya dayanıksız aletler, kumaş vb. malzemeler bu yöntemle steril edilemez.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-