



KÜVÖZ TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_021	06.08.2012	02.01.2023	1	3

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

02.01.2023

TEMOS standartları doğrultusunda talimat gözden geçirildi.
Logo değiştirildi.

01

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Enfeksiyon Kontrol Kurulu	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



KÜVÖZ TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_021	06.08.2012	02.01.2023	1	3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolüdür. Enfeksiyon etkenlerinin yenidoğan bebekler arasında ve bebekten personele, personelden bebeğe bulaşmasını önlemektir.

2. KAPSAM

Küvöz temizliği ile ilgili tüm faaliyetleri içerir.

3. SORUMLULAR

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde görev alan tüm çalışanlar ve hastayla ilgili elemanları ve Enfeksiyon Kontrol Ekibi bu talimatın uygulanmasından sorumludurlar.

4. TANIMLAR

4.1. Küvöz: Yenidoğan bebeklerin vücut ısılarının korumasını sağlamak amacıyla tasarlanmış, belli bir ısı ve nem oranı ayarlanabilen; şeffaf kapaklı kabin bölümü, ısıtma, nemlendirme, havalandırma işlevlerini sağlayan denetim bölümü ve gövde bölümünden oluşan cihazdır.

4.2. Dezenfektan: Cansız maddelerdeki patojen mikroorganizmaların üremelerini durdurmak ya da öldürmek amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir.

4.3. Enfeksiyon Kontrol Ekibi: Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ve Enfeksiyon Kontrolünden Sorumlu Hekimi tanımlar.

4.4. Hastane Yönetimi: Hastane Başhekimliği, Hemşirelik Hizmetleri Koordinatörlüğü.

5. KISALTMALAR: -

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Küvözlerin temizliğinde kullanılan bezler her küvöz için bir kez kullanılmalıdır.

6.2. Temizlik günlük olarak ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda yapılır.

6.3. Bebek çıktıktan sonra küvöz dezenfekte edilerek kullanılmalı. Uzun süre yatan bebeklerde haftada iki, bir kilogramdan küçük bebeklerde ise üç günde bir, bebek başka bir yere alınarak küvözler dezenfekte edilmelidir.

6.4. Dezenfeksiyon işlemi öncesinde küvözün mekanik olarak kirden arındırılması işlemi yapılır.



KÜVÖZ TEMİZLİĞİ TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
ENF_T_021	06.08.2012	02.01.2023	1	3

- 6.5.** Kuvözün tüm parçaları birbirinden ayrılır. Çıkabilen tüm parçalar kuvözden sökülür.
- 6.6.** Temiz kuru bez ile su ve sabun kullanılarak kuvözün tüm parçaları tek tek silinir.
- 6.7.** Silinme işlemi tamamlanmış parçalar durulanır ve temiz kuru bez ile kurulanır.
- 6.8.** Kurulama işlemini takiben kuvöz dezenfektanı 30 cm uzaktan kuvözün tüm yüzeylerine ve bütün parçalarına sıkılır. Ürünün kullanma talimatına uygun olarak önerilen süre kadar bekledikten sonra durulanır ve temiz kuru bez ile silinir. Yüzeyler kuruduktan sonra, bebek kuvöze alınmalıdır.
- 6.9.** En yoğun kontaminasyon bölgesi olan dış kapaklar, bu kapakları saran yastıkçık ve kollar gün içinde en az iki kez deterjan silinmelidir.
- 6.10.** Kuvöz dezenfeksiyonu dışında oksijen ve hava filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılmalıdır.
- 6.11.** Enfekte olup izolasyon odasında takip edilen bebekler, taburcu edildikten sonra kuvözlerinden alınan yüzeyel sürüntü kültüründe üremesi olmadığı gösterildikten sonra o kuvöze yeni bebek alınır.
- 6.12.** Kuvözlerin günlük temizliği su ve deterjan ile yapılır. Haftalık ve taburculuk sonrası yapılan temizliğinde kuvözün plastik olan kısımları D.D.S.H. spreyi ile metal kısımları ise Hexeinos solüsyonu ile yapılmalıdır. Hexeinos solüsyonu 1 litre suya 5 cc hexeinos solüsyonu eklenerek hazırlanır. Kuvöz temizliğinde alkol bazlı temizleyiciler kullanılmamalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- 7.1.** Sterilizasyon-Dezenfeksiyon Talimatı
- 7.2.** Standart Önlemler ve İzolasyon Talimatı
- 7.3.** El Hijyeni Talimatı