



CPM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_01	02.01.2023	-	-	2

REVİZYON DURUMU

“Revizyon Tarihi”

“Açıklama”

“Revizyon No”

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Fizik Tedavi Anabilim Dalı Başkanı	Kalite Koordinatörü	Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı



CPM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

Doküman No:	İlk Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Toplam Sayfa Sayısı:
FTR_T_01	02.01.2023	-	-	2

1. AMAÇ

Aktif pasif eksantrik konsantrik çalışabilen diz cpm cihazının verimli ve doğru kullanımını sağlamak

2. KAPSAM

Aktif pasif eksantrik konsantrik çalışabilen diz cpm cihazının kullanımı sırasında, dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

3.1. CPM: Continous Passive Motion

4. TANIMLAR

Continous Passive Motion: Sürekli pasif hareket.

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından başhekim, başhekim yardımcısı, doktor ve fizyoterapist sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Uygulama

6.1.1. Cihazı tedavi uygulanacak yatak üzerine koyunuz ve hasta bacağını cihaz üstüne yerleştiriniz.

6.1.2. Cihazı prize takın.

6.1.3. Cihaz üzerindeki açma kapama düğmesinden cihazı açınız

6.1.4. Cihazın ön tarafında bulunan cihaz sabitleme demirlerini her iki yana açın

6.1.5. Cihazın kumandasına tedavi kartı takınız.

6.1.6. Kumanda üzerinden menü tuşuna basınız ve uygulamak istediğimiz programı yukarı aşağı sağa ve sola tuşları ile seçiniz.

6.1.7. Diz fleksiyon ve ekstansiyon derecelerini yukarı aşağı tuşları yardımıyla seçiniz.

6.1.8. Start tuşuna basarak tedaviyi başlatın.

6.2 Dikkat Edilmesi Gerekenler

6.2.1. Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın.

6.2.2. Tedaviye başlamadan önce uyluk uzunluğu ayarlama skalasının eşit olduğundan emin olun. Eşit olmadığı durumda düzeltin, aksi durumda merkez açılı mekanizması bozulacaktır.

6.2.3. Tedaviden önce tibia uzunluğu ayarlama skala vidasının sıkı olduğunu kontrol ediniz.

6.2.4. Tedaviden önce cihazın yatak üzerinde güvenli ve sabit durduğundan emin olun.

6.3 Bakımı

6.3.1. Cihazın bakımı sırasında fişini çekin.

6.3.2. Cihazın kumanda ekranını ekran silme beziyle temizleyin.

6.3.3. Cihazın üzerinde soft plastik uyluk ve baldır desteklerini nemli bir bezle, gerektiğinde renksiz bir dezenfektan yardımıyla temizleyin.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:-